

ANEXO 1 - Norma Interna de Funcionamento do Laboratório (NIF- Laboratórios Audiologia/Eletrofisiologia e Vectoeletronistagmografia)

Todos os usuários dos laboratórios de audiologia da UFCSPA devem seguir as seguintes **normas gerais**:

- 1) Manter o local organizado e limpo após o uso.
- 2) Utilizar as salas 113 e/ou 114 apenas no horário reservado (usar formulário específico disponível com o docente responsável).
- 3) Não consumir alimentos nos laboratórios.
- 4) Não deixar garrafas com líquidos próximos aos equipamentos.
- 5) Revisar o fechamento da janela da sala 114 antes de sair da sala.
- 6) Higienizar o material utilizado para as atividades após o uso (otocones, olivas, etc).
- 7) Verificar se o computador e o ar-condicionado estão desligados antes de sair das salas.
- 8) Retirar da tomada todos os equipamentos das salas.
- 9) O acesso de alunos aos laboratórios só pode ser realizado sob acompanhamento de docente responsável ou pesquisador autorizado.
- 10) Durante as aulas práticas, os alunos devem deixar seus materiais nos armários (localizados em frente à sala 113). As chaves dos armários devem ser retiradas com o responsável pela aula e devidamente devolvidas após a conclusão da atividade.
- 11) Os pesquisadores que fazem uso das salas devem seguir rigorosamente as normas estabelecidas, bem como só podem utilizar as salas nos horários solicitados em planilha e autorizados pelo docente responsável.

Em relação ao **uso dos equipamentos audiológicos**, os usuários devem seguir as seguintes recomendações:

- 1) Ligar na tomada e desligar após o uso (revisar antes de fechar a sala).
- 2) Colocar a capa protetora em todos os equipamentos após o uso.
- 3) Desenrolar todos os cabos dos equipamentos após o uso de forma que não fiquem enrolados e possam ser danificados.
- 4) Manusear os equipamentos com delicadeza para evitar danos.

Quanto à **higienização dos materiais** reutilizáveis (otocones e olivas), o usuário responsável deve realizar os seguintes procedimentos:

- 1) Lavar em água corrente.
- 2) Utilizar sabão líquido para limpeza e escovação de cada material.
- 3) Lavar novamente em água corrente após a limpeza cuidadosa.
- 4) Organizar os materiais limpos em cima de superfície plana e papel toalha para secagem.
- 5) Passar álcool 70% para finalizar a limpeza.
- 6) Recolocar nas respectivas caixas de material limpo após a higienização completa.